

Метод взятия мазка слизистой полости рта

Специальную щетку (cytobrush) пришлем вам бесплатно

1. Полость рта животного должна быть чистой. Рекомендуется не давать пищу и не поить животное за 30 - 60 минут до отбора пробы.
2. Выньте щетку из упаковки.
3. Старайтесь не прикасаться ворсинками щетки к другим тканям, кроме полости рта исследуемого животного.
4. Стерильной щеткой протирайте внутреннюю сторону щеки животного в течение 5 секунд, меняя направление движения.
5. Мазок отбирайте очень тщательно!
6. После завершения взятия мазка на щетке должно оставаться видимое количество клеток.
7. Щетку в течение 30 секунд подсушите на воздухе.
8. Вставьте щетку обратно в упаковку.
9. На упаковке пробы напишите кличку животного или номер, который позднее внесете и в заявку у клички животного.
10. Щетку Cytobrush положите в конверт и отправьте обычной почтой.

Меры при взятии мазка слизистой выкармливаемых молоком детёнышей

При взятии мазка из полости рта молочных детенышей имеется опасность контаминации клетками матери. Это может привести к искажению результатов анализа.

Молочные детеныши до взятия пробы в течение 60 мин. должны оставаться без контакта с матерью и остальными членами выводка. Рекомендуется накормить или напоить детеныша, благодаря чему полость рта окажется механически очищенной.

После последнего приема пищи или воды надо подождать еще 30 мин. и только теперь взять пробу.

Фотография щетки cytobrush

